

Návod na použití setu



1. Černý dilatátor se vsune do bílého sheathu a zamkne se



2. Napíchnete jehlu do žíly a přes jehlu nasunete drát do žíly.




Návod na použití setu

3. Na drát se nasune dilatátor se sheathem a zavede se do žíly



4. Černý dilatátor se pootočením odemkne a spolu s drátem se vytáhne s bílého sheathu, bílý sheath zůstává v žíle.

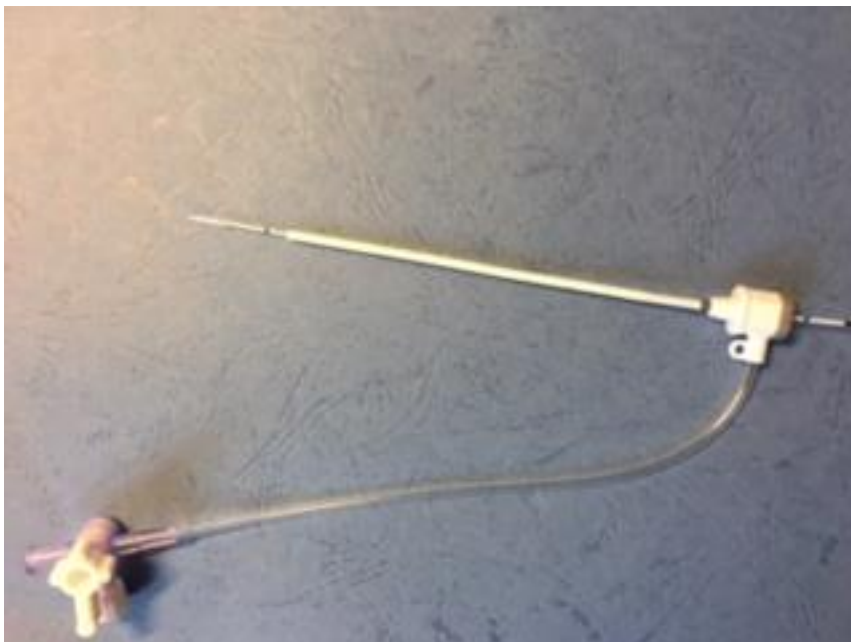

5. Do bílého sheathu se zavede vlákno 600 um nebo 400 um, vlákno se vsune do žíly na požadované místo.
6. Na laseru si nastavíte požadovaný výkon a vytahujete pomalu vlákno (na vlákně je centimetrové měřítko), například při požadované energii 60 J / cm -Na laseru nastavíte výkon 10 W a za 6 sekund posunete vlákno o 1 centimetr.